


GUIDE

TRAVAILLER AVEC LES PROGRAMMES




Un programme est un ensemble de sessions. Créer des programmes vous permet de planifier votre travail sur plusieurs mois, en quelques minutes. Découvrons comment faire ci-dessous.

1. Se rendre dans "Programmes numériques"

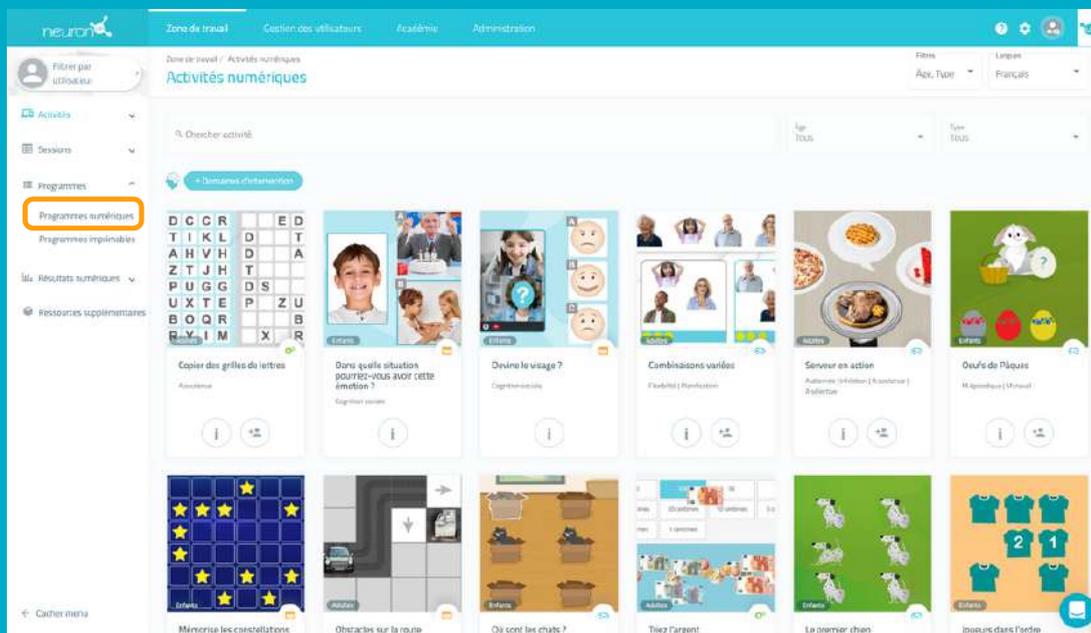

Pour commencer, cliquez sur "programmes" puis sur "programmes numériques" sur la partie gauche de votre écran.

2. Cliquer sur "Nouveau programme numérique"

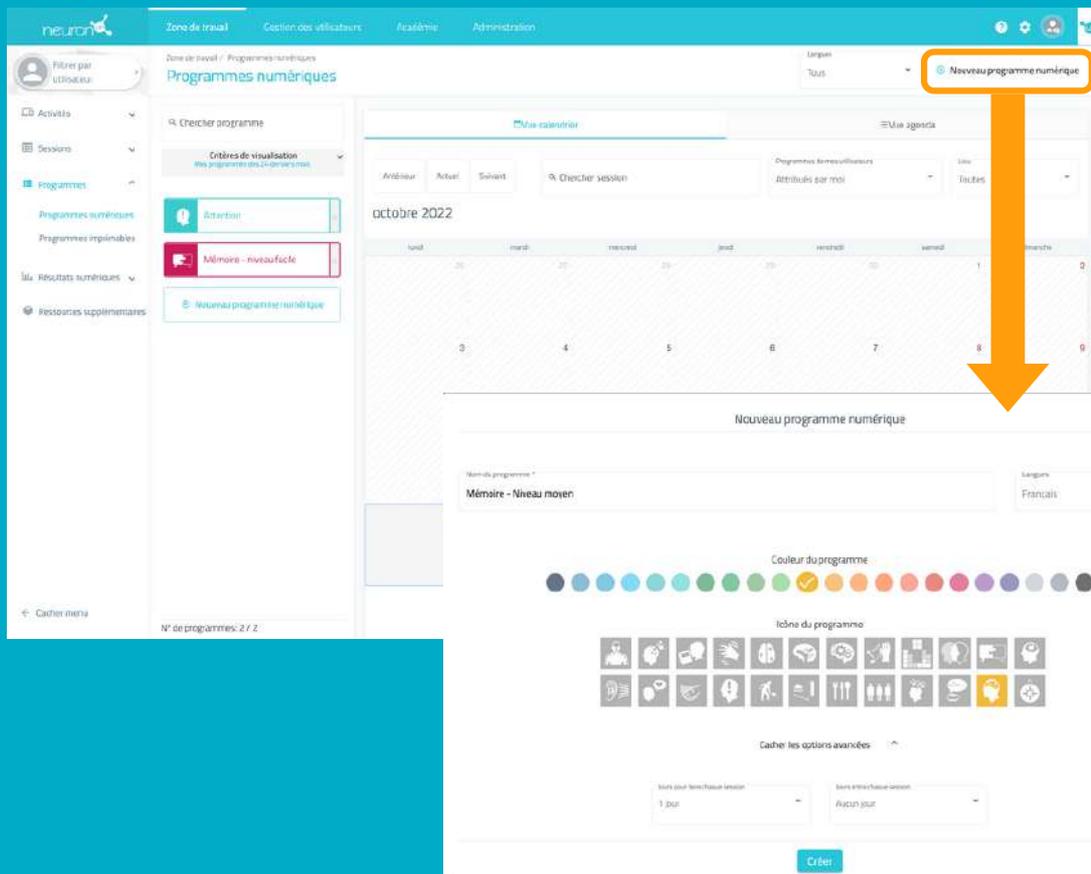

Une fois que vous aurez cliqué sur "Nouveau programme numérique", la fenêtre ci-dessous apparaîtra.

3. Remplir les informations de base du programme

Nouveau programme numérique

Nom du programme *
Mémoire - Niveau moyen

Langues
Français

Couleur du programme

Icône du programme

Cacher les options avancées

Jours pour faire chaque session
5 jours

Jours entre chaque session
3 jours

Programme à domicile
NON

Étiquettes
mémoire niveau moyen

Description
Programme de travail pour les patients du groupe 4 et 5

Évaluation de l'utilisateur OUI

Confirmer la fin de l'activité OUI

Touche continuer OUI

Créer

- Donnez un nom à votre programme
- Choisissez un icône et une couleur

Optionnel :

- Cliquez sur "Options avancées"
- Déterminer le nombre de **jours** que votre patient aura pour faire chaque session et le nombre de jours de repos entre chacune d'entre-elles.
- Ajoutez des **étiquettes**, cela vous aidera à retrouver votre programme plus facilement
- Ajoutez une **description**
- Activez ou désactivez les actions.

4. Ajouter les sessions de votre choix

neuron

Zone de travail Gestion des utilisateurs Actions Administrateur

Contenu du programme

Zone de travail Programmes numériques Modifier programme Mémoire - Niveau moyen

Mémoire - Niveau moyen

Créé par: Elise A

Programme de travail pour les patients du groupe 4 et 5

Mémoire Niveau moyen

Avec évaluation de l'utilisateur, Oui, confirmer la fin de l'activité, Avec touche continuer

3 jours entre chaque session, 3 jours de distance entre chaque session

Session	Professionnel	Actions
Attention sélective	Elise A	Voir Modifier Expliquer Ajouter
Attention alternée et soutenue - Pône	Elise A	Voir Modifier Expliquer Ajouter
Mémoire de travail	Elise A	Voir Modifier Expliquer Ajouter
Mémoire	Elise A	Voir Modifier Expliquer Ajouter

Modifier les options

Supprimer le programme

neuron

Zone de travail Gestion des utilisateurs Actions Administrateur

Contenu du programme

Zone de travail Programmes numériques Modifier programme Mémoire - Niveau moyen

Mémoire - Niveau moyen

Créé par: Elise A

Programme de travail pour les patients du groupe 4 et 5

Mémoire Niveau moyen

Avec évaluation de l'utilisateur, Oui, confirmer la fin de l'activité, Avec touche continuer


3 jours entre chaque session, 3 jours de distance entre chaque session

12 sessions

Supprimer le programme

La base du programme est créée, il faut maintenant y ajouter les sessions que vous souhaitez.


5. Enregistrer le programme

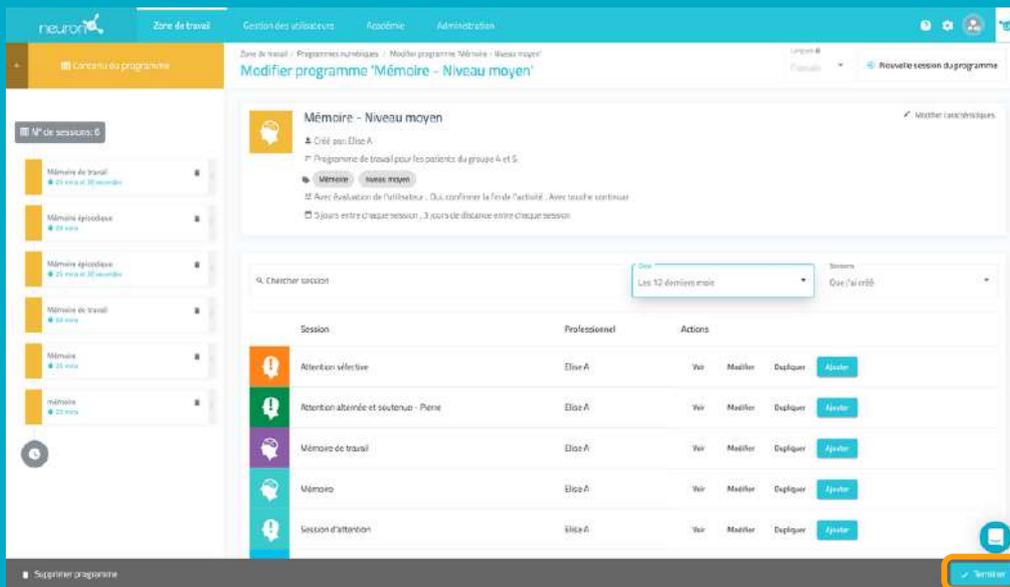


Une fois votre programme configuré, cliquez en bas à droite sur "Terminer" pour l'enregistrer.

(Vous pourrez le modifier par la suite si besoin)

6. Assigner le programme

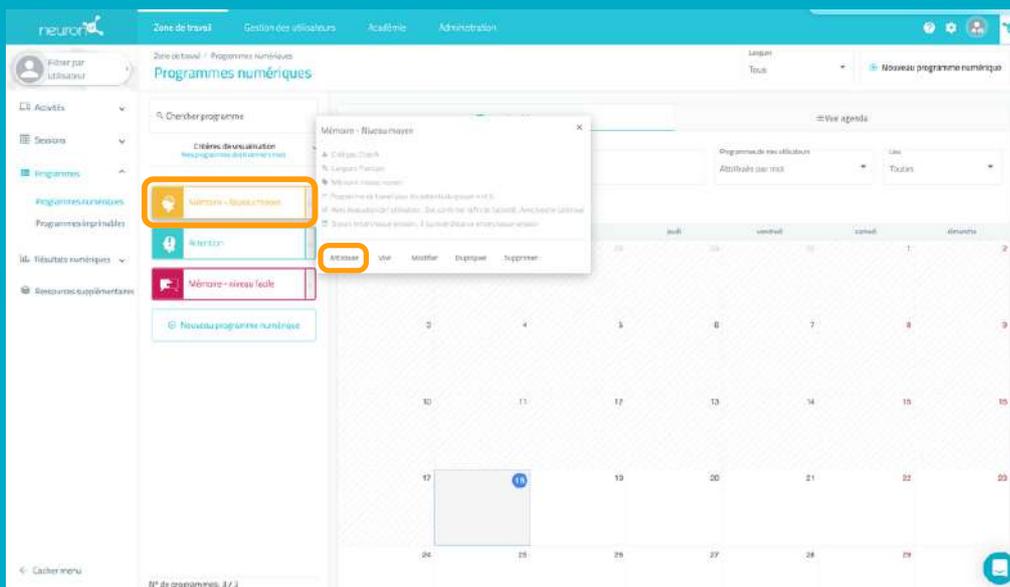

Cliquez sur le programme ou faite le glisser à la date souhaitée.

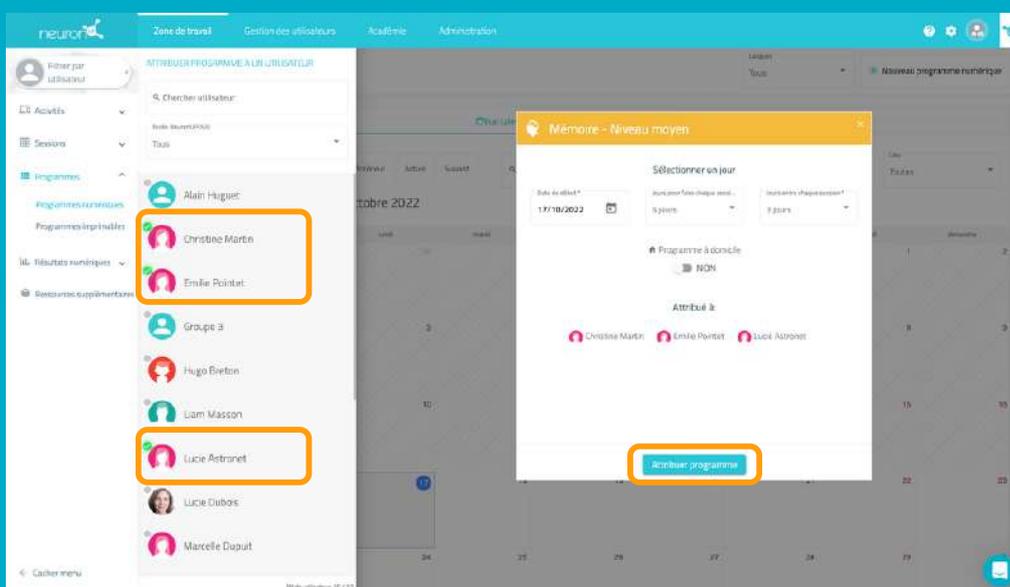


Sélectionnez un ou plusieurs patients à qui assigner le programme.*

* Voir tutoriel 'différentes manières de travailler avec NeuroNUP'

Activez le filtre **session à domicile** si vous voulez que votre patient travaille à distance.*

* Voir tutoriel NeuroNUP2GO

7. Démarrer le programme

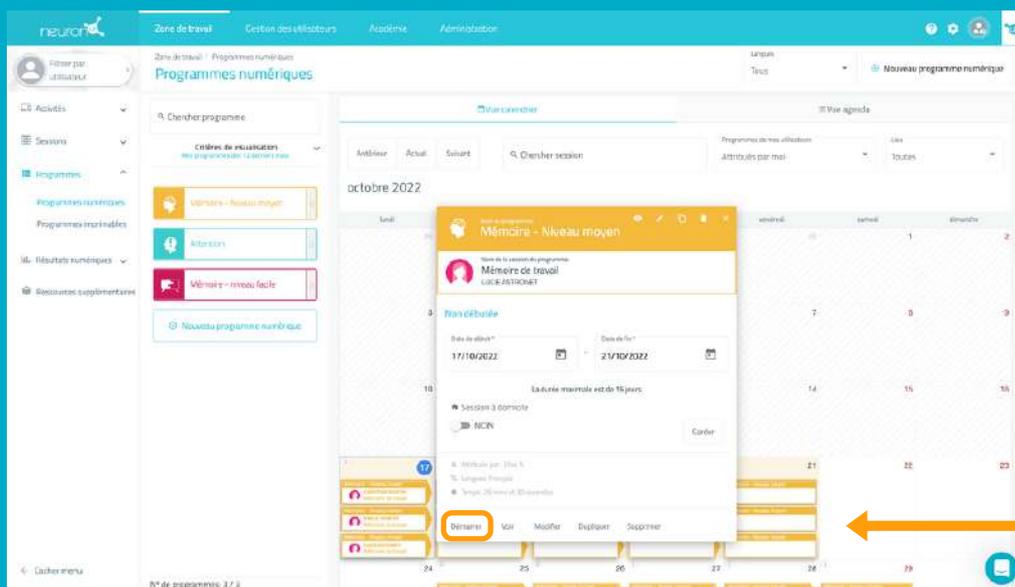

Pour démarrer un programme il faut obligatoirement qu'il soit attribué et que nous nous trouvions dans la plage de dates de ce dernier. (Comme sur l'exemple)


Ci c'est le cas, cliquez sur "Démarrer"

8. Suivez l'avancée du programme



Une fois le programme démarré, vous pourrez suivre son évolution grâce à l'apparition d'une jauge.

Vue calendrier / Vue agenda

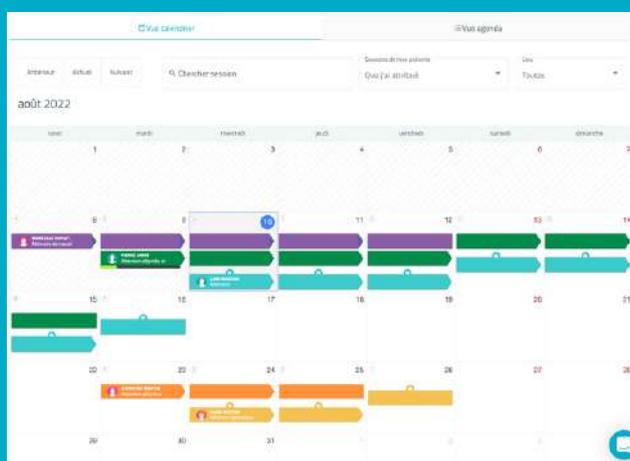

Date	Session	Utilisateur	En cours
25/10/2022 - 30/10/2022	Mémoire - Niveau moyen - Mémoire épisodique	LUCIE ASTRONET	Non débutée
25/10/2022 - 30/10/2022	Mémoire - Niveau moyen - Mémoire épisodique	EMILIE POINTET	Non débutée
26/10/2022 - 30/10/2022	Mémoire - Niveau moyen - Mémoire épisodique	CHRISTINE MARTIN	Non débutée
18/10/2022 - 22/10/2022	Mémoire - Niveau moyen - Mémoire de travail	LUCIE ASTRONET	Non débutée
18/10/2022 - 22/10/2022	Mémoire - Niveau moyen - Mémoire de travail	EMILIE POINTET	Non débutée
18/10/2022 - 22/10/2022	Mémoire - Niveau moyen - Mémoire de travail	CHRISTINE MARTIN	100% terminée

Vous pouvez voir et organiser vos programmes avec la vue calendrier (à gauche) ou avec la vue agenda (à droite).