





Une session est un ensemble d'activités. Créer des sessions vous permet de planifier votre travail en quelques minutes. Découvrons comment faire ci-dessous.

## 1. Se rendre dans "Sessions numériques"

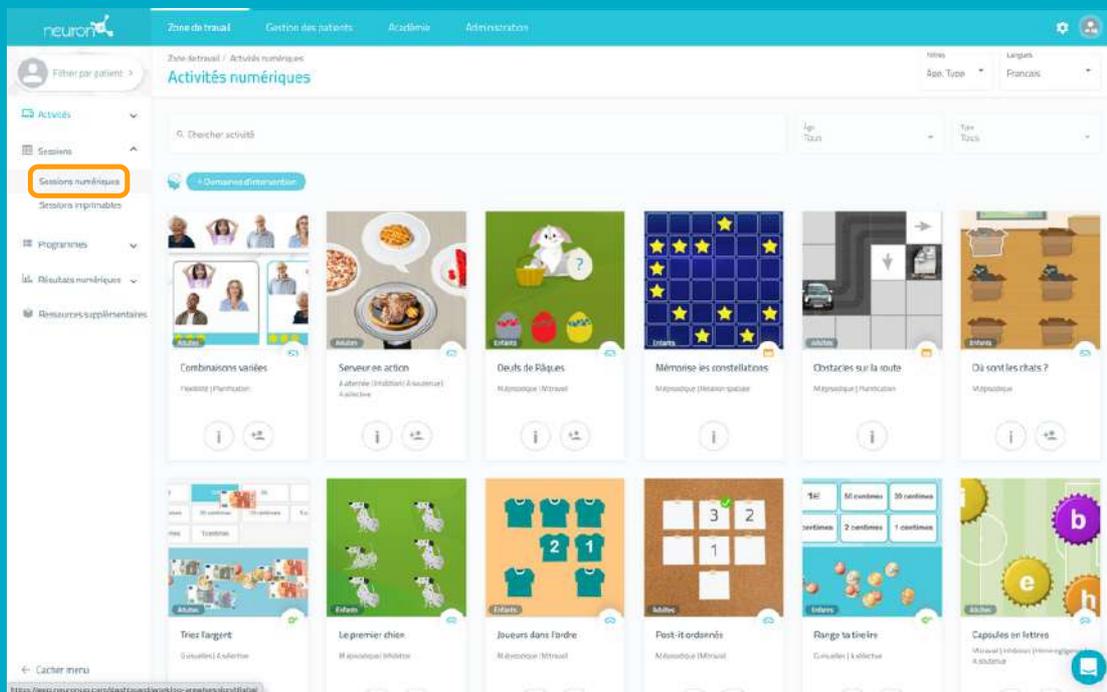

Pour commencer, cliquez sur "sessions" puis sur "session numériques" sur la partie gauche de votre écran.

## 2. Cliquer sur "Nouvelle session numérique"

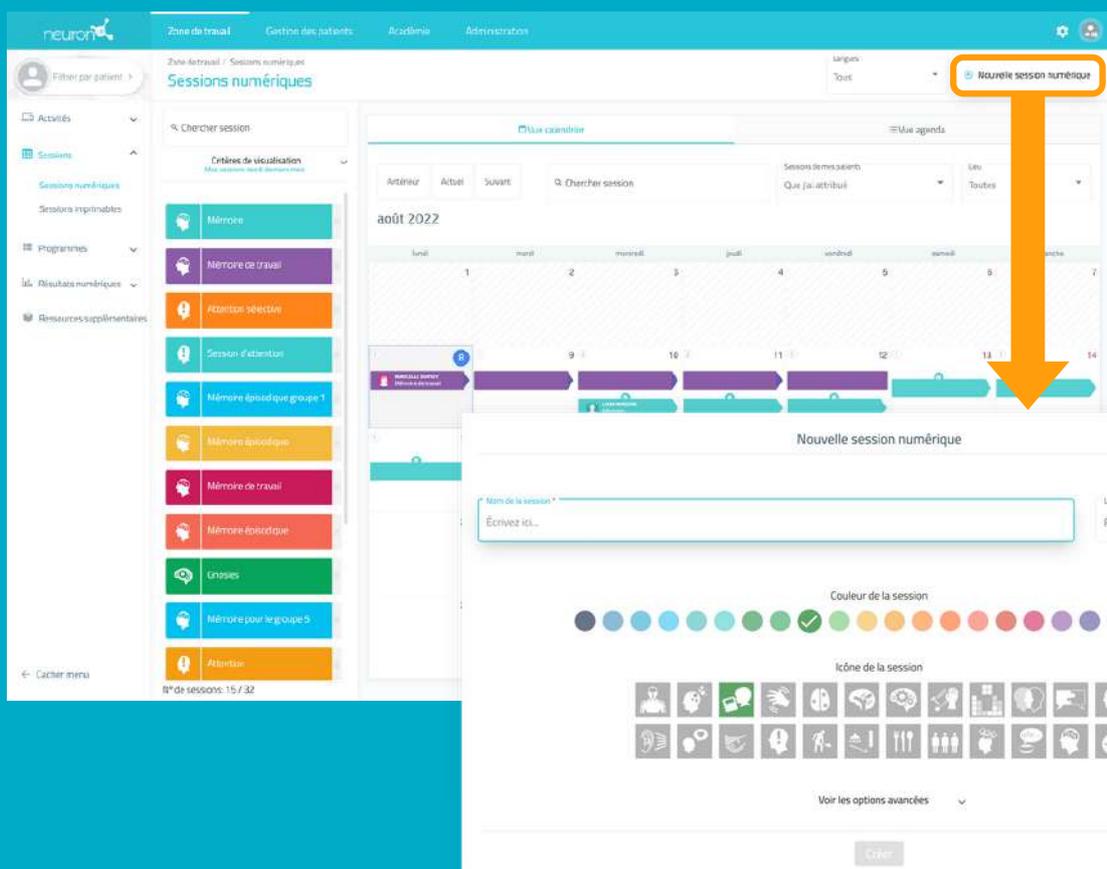

Une fois que vous aurez cliqué sur "Nouvelle session numérique", la fenêtre ci-dessous apparaîtra.

### 3. Remplir les informations de base de la session

Nouvelle session numérique

Nom de la session \*  
Attention alternée et soutenue - Pierre

Langues  
Français

Couleur de la session

Icône de la session

Cacher les options avancées

Étiquettes  
attention alternée attention soutenue Pierre Écrivez ici...

Description  
Session pour Pierre avec pour objectif le travail de l'attention soutenue et alternée

Évaluation du patient  OUI    Confirmer la fin de l'activité  OUI    Touche continuer  OUI

Créer

- Donnez un nom à votre session.
- Choisissez un icône et une couleur.

#### Optionnel :

- Cliquez sur "Options avancées".
- Ajoutez des **étiquettes**, cela vous aidera à retrouver votre session plus facilement.
- Ajoutez une **description** de la session.
- Activez ou désactivez les actions.

Cliquez sur "Créer".

### 4. Filtrer les activités

neuron

zone de travail    Gestion des patients    Académie    Administration

Contenu de la session

Modifier session 'Attention alternée et soutenue - Pierre'

Attention alternée et soutenue - Pierre

Créée par: Elise

Séance pour Pierre avec pour objectif le travail de l'attention soutenue et alternée

Attention soutenue Pierre attention alternée

Avec évaluation du patient, OUI, confirmer la fin de l'activité, Avec touche continuer

Chercher activité

Domaines d'intervention

Fonctions cognitives Vie quotidienne


- Orientation
- Attention
  - Vitesse de traitement
  - Soutenue
  - Sélective
  - Alternée
  - Méminéligence
- Mémoire
- Langage
- Fonctions Exécutives
- Gnosies
- Praxies
- Habiletés visuo-spatiales
- Cognition sociale

Terminer

La base de la session est créée, il faut maintenant y ajouter les activités que vous souhaitez.

Pour cela, vous pouvez filtrer les activités par fonctions cognitives, par type d'activités ou par âge.

## 5. Choisir les activités

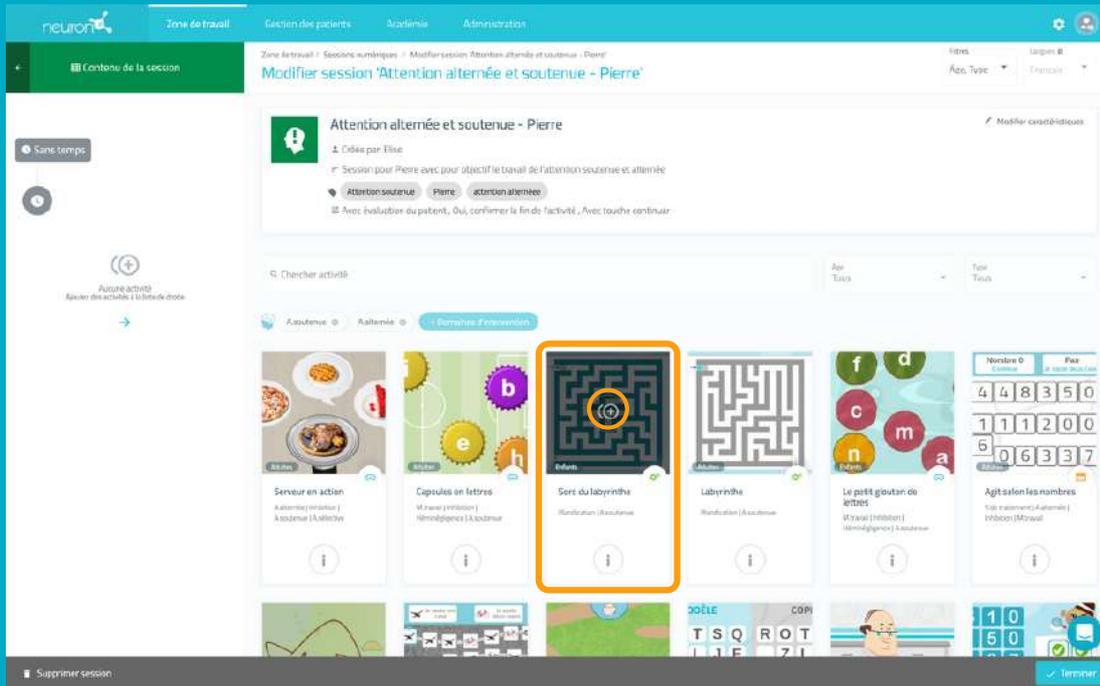


Une fois les activités filtrées, il vous suffit de cliquer sur celles que vous voulez ajouter à votre session.

Les activités sélectionnées apparaîtront sur la partie gauche de l'écran au fur et à mesure.

*\* Il est possible d'ajouter plusieurs fois la même activité.*

### \* Optionnel : Modifier l'ordre des activités

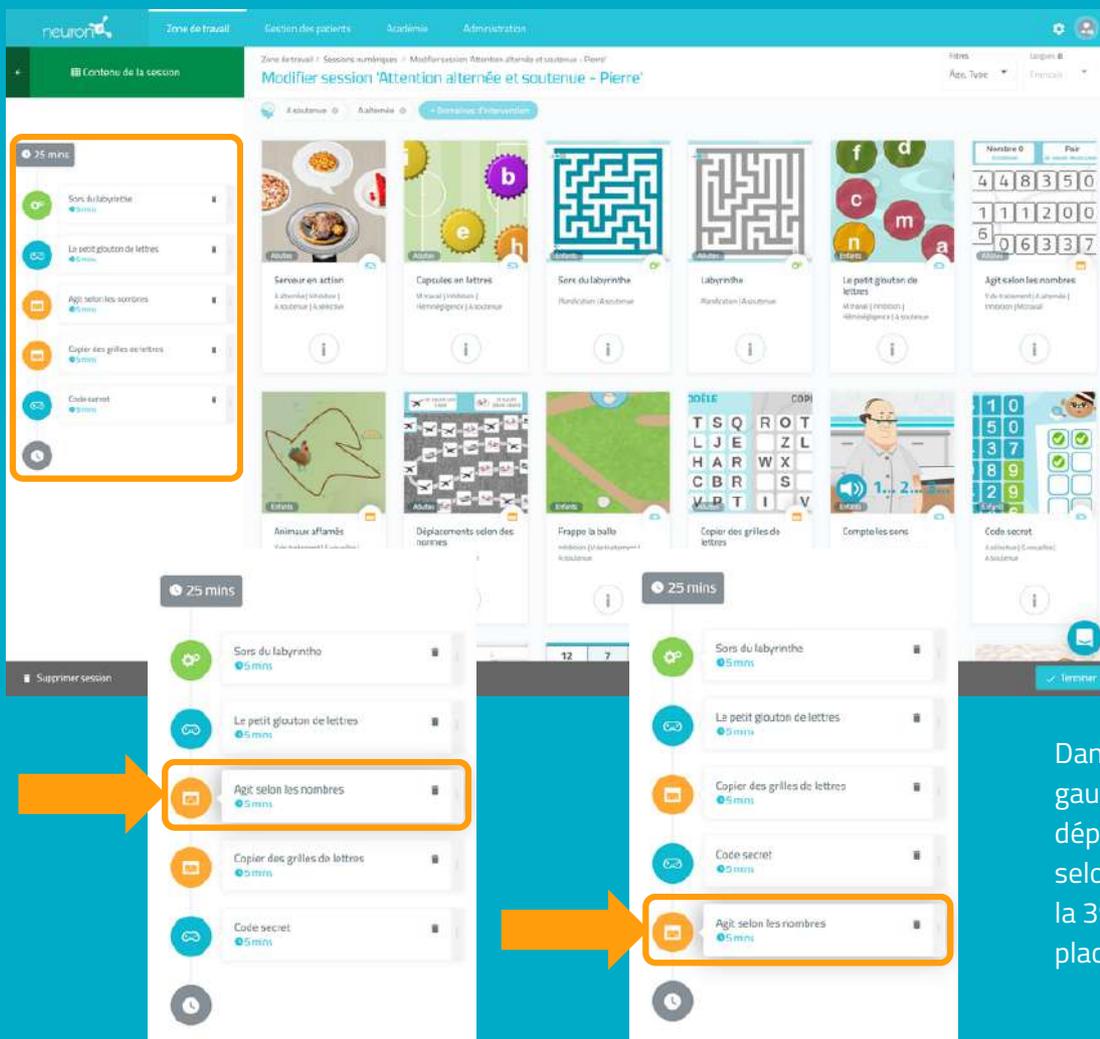

Vous pouvez modifier l'ordre des activités.



Il vous suffit de maintenir le clic sur l'activité et de la déplacer à l'endroit souhaité.

Dans l'exemple à gauche, nous avons déplacé l'activité "Agit selon les nombres" de la 3<sup>e</sup> à la dernière place.

## 6. Configurer les activités (optionnel)

Par défaut, chaque activité durera 5 minutes et votre patient commencera au niveau auquel il s'était arrêté la dernière fois, ou au niveau le plus bas s'il n'a jamais travaillé avec l'activité en question. Pour configurer vous-même ces paramètres, il vous suffit de cliquer sur chaque activité et modifier les paramètres, comme nous vous le montrons ci-dessous.

### Générateur

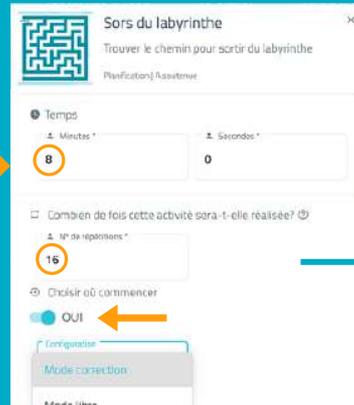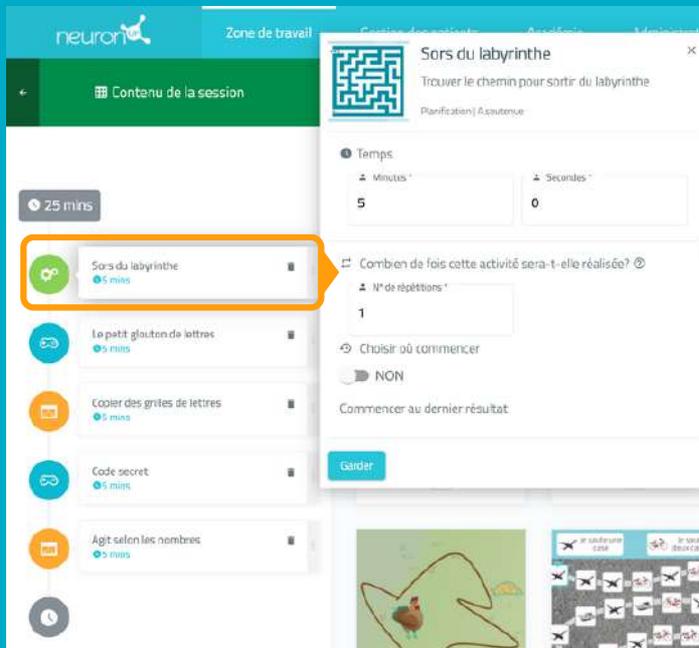



Définissez le temps de travail.

Cette activité est un générateur : adaptez le nombre de répétitions\*.

Vous pouvez sélectionner la personnalisation créée au préalable pour Pierre.

\*Dans le cas des générateurs, il est important d'augmenter le nombre de répétitions si vous voulez que votre patient travaille réellement 5 minutes (ou plus). Sinon, une fois que le patient aura terminé la répétition, il passera directement à l'activité suivante.



### Jeu

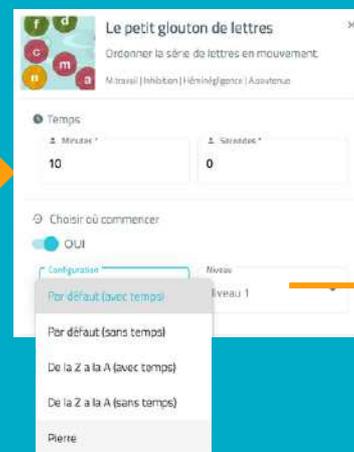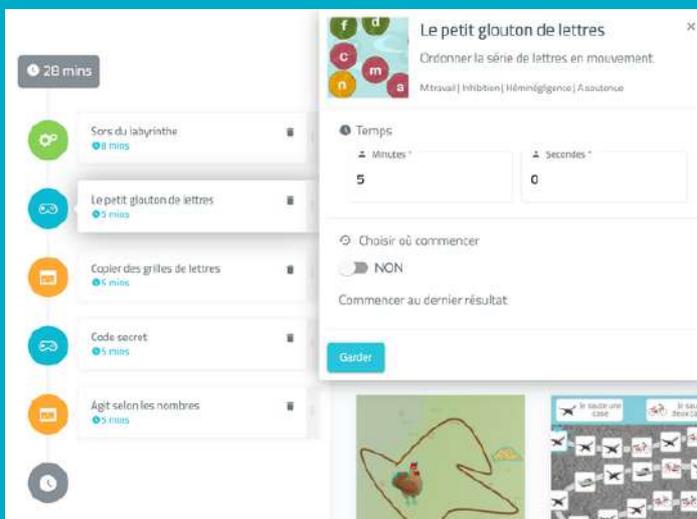

Pour les jeux, la démarche est similaire.

La différence est que vous pouvez déterminer le niveau auquel le patient débutera.

### Fiche

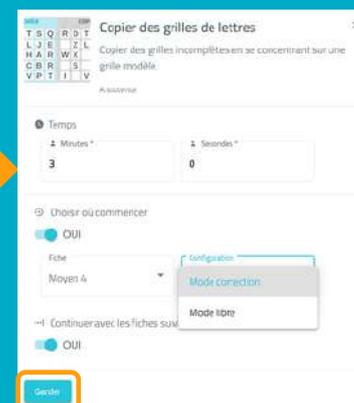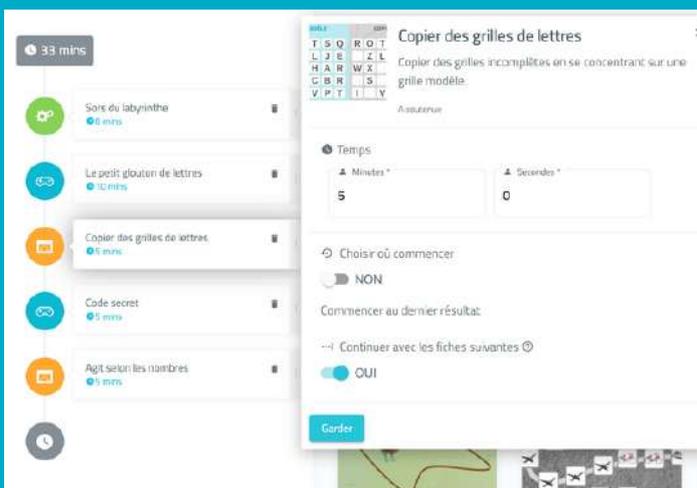


Pour les fiches, la démarche est identique à celle des jeux.

La différence est que vous ne pouvez pas choisir de personnalisation, car il n'est pas possible de personnaliser une fiche.

N'oubliez pas de sauvegarder pour chaque activité.


## 7. Enregistrer la session

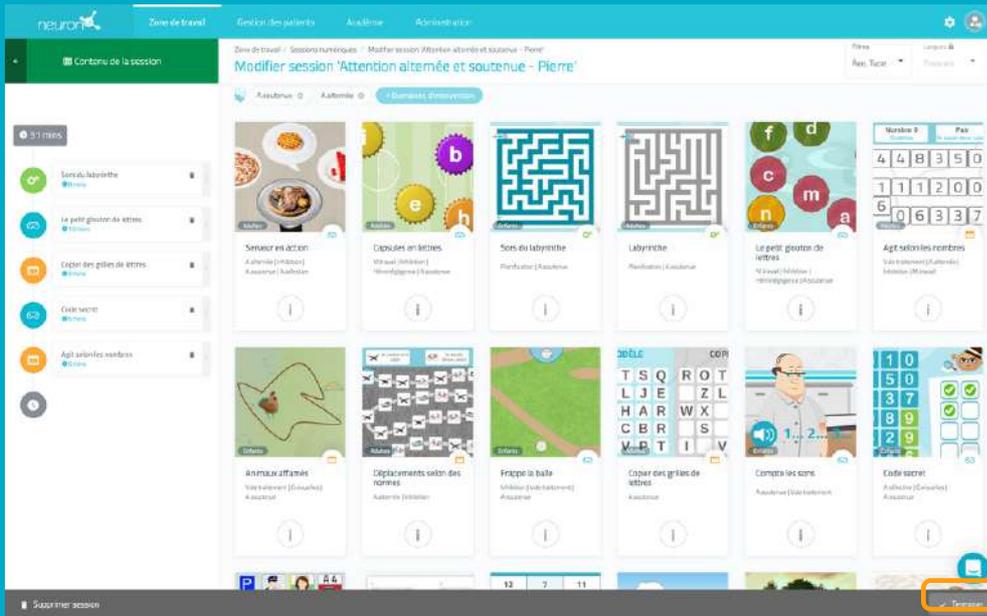


Une fois votre session configurée, cliquez en bas à droite sur "Terminer" pour enregistrer la session.

(Vous pourrez la modifier par la suite si besoin).

## 8. Assigner la session

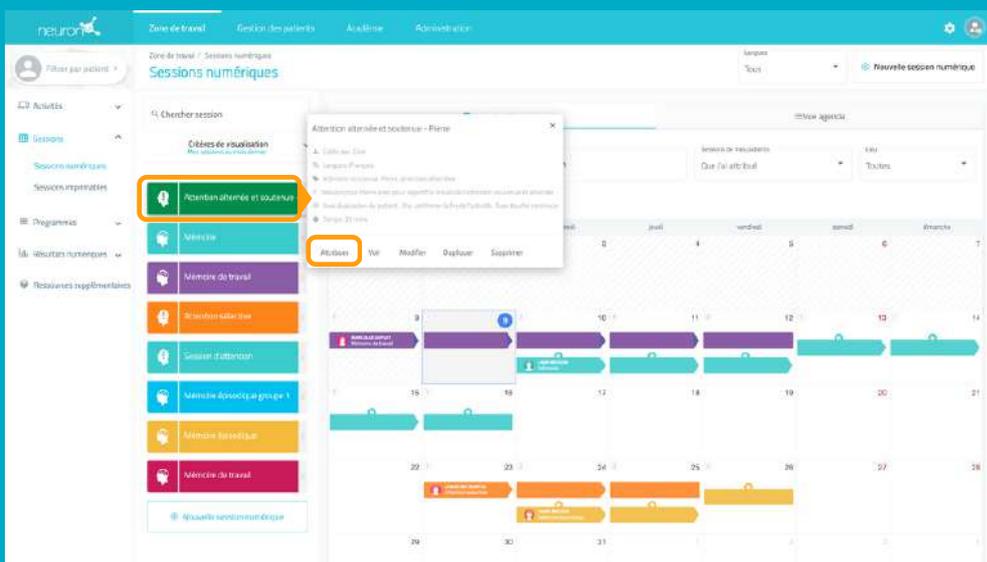

Cliquez sur la session ou faite la glisser à la date souhaitée.

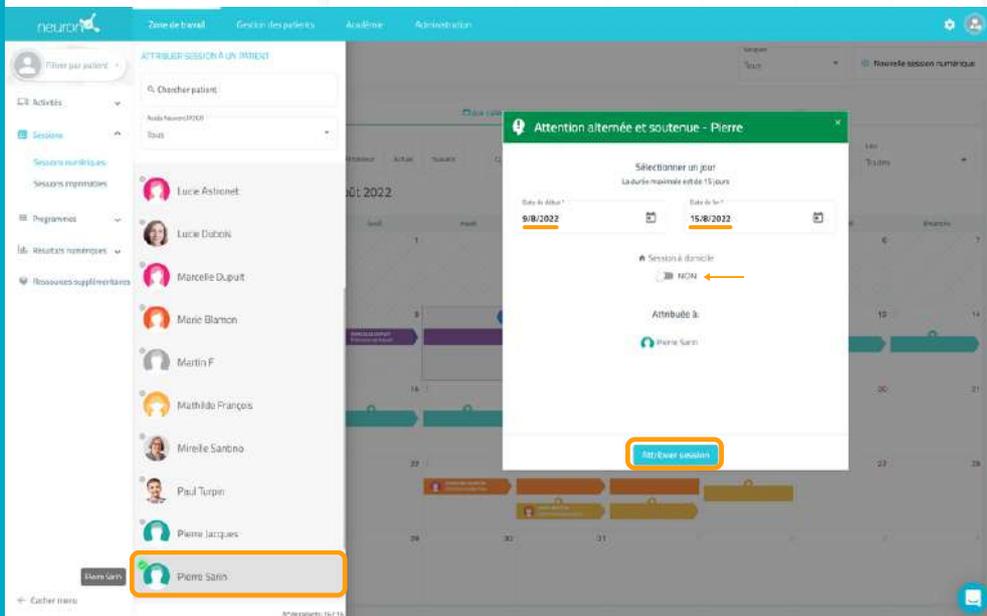


Sélectionnez un ou plusieurs **patients** à qui assigner la session.\*  
\* Voir tutoriel 'travailler avec plusieurs patients simultanément'.

Définissez la date de début et la **date** de fin pour faire la session.

Activez le filtre **session à domicile** si vous voulez que votre patient travaille à distance.\*

\* Voir tutoriel travailler avec NeuronUP2GO.

## 9. Démarrer la session

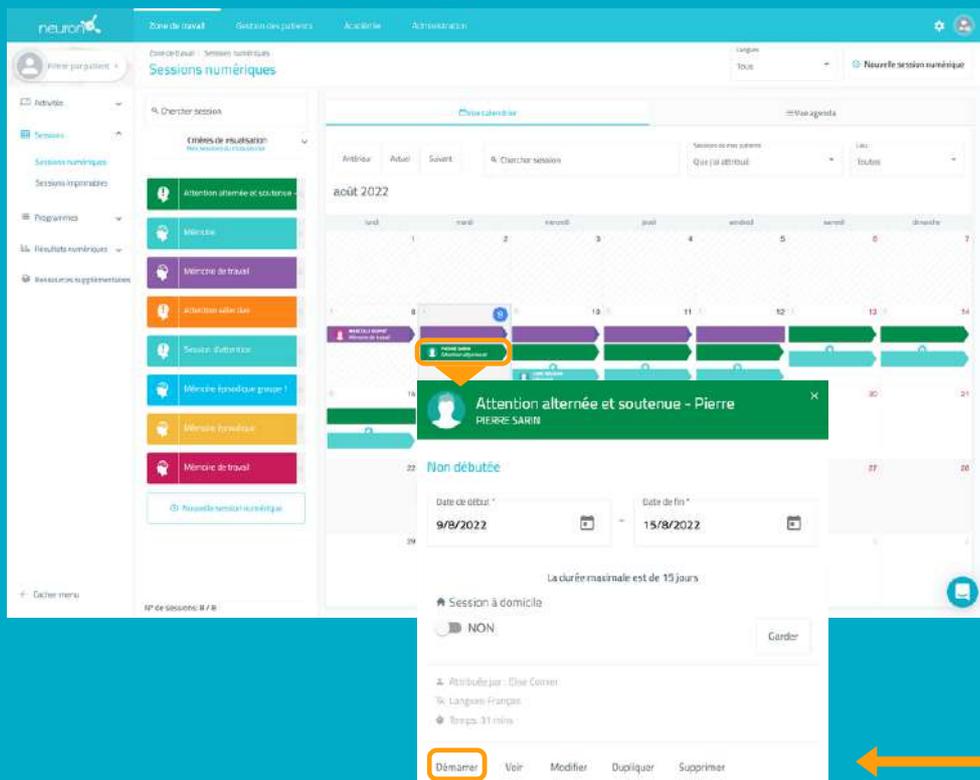

Pour démarrer une session, il faut obligatoirement qu'elle soit attribuée et que nous nous trouvions dans la plage de dates de cette dernière. (Comme sur l'exemple)



Ci c'est le cas, cliquez sur "Démarrer".

## 10. Suivez l'avancée de la session



Une fois la session démarrée, vous pourrez suivre son évolution grâce à l'apparition d'une jauge.

## Vue calendrier / Vue agenda

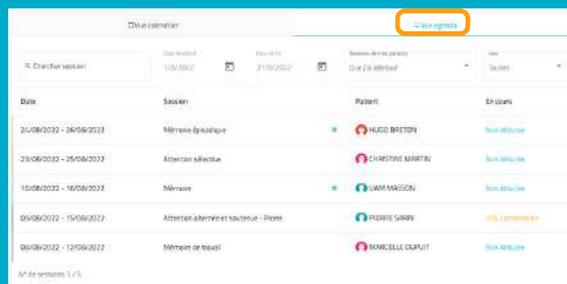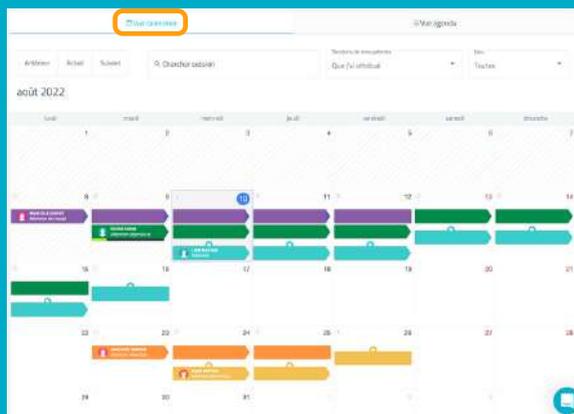

Vous pouvez voir et organiser vos sessions avec la vue calendrier (à gauche) ou avec la vue agenda (à droite).