

# GUIDE

TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS  
PATIENTS SIMULTANÉMENT






Avec NeuronUP, vous pouvez faire travailler vos patients en même temps sur différents dispositifs.




Pour cela, vous allez devoir vous connecter successivement avec vos accès sur l'ordinateur de chaque patient et lancer la session que vous avez assigné.

## 1. Premièrement vous allez devoir assigner une session

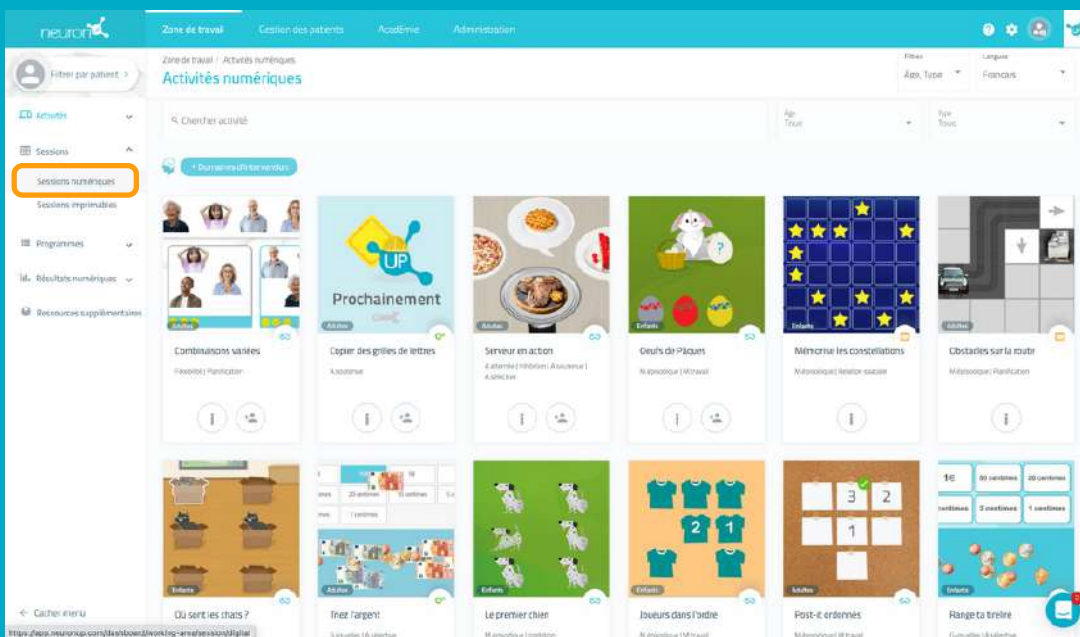


Depuis le menu, allez dans session puis sessions numériques.

## 2. Choisissez et cliquez sur une session pour l'attribuer

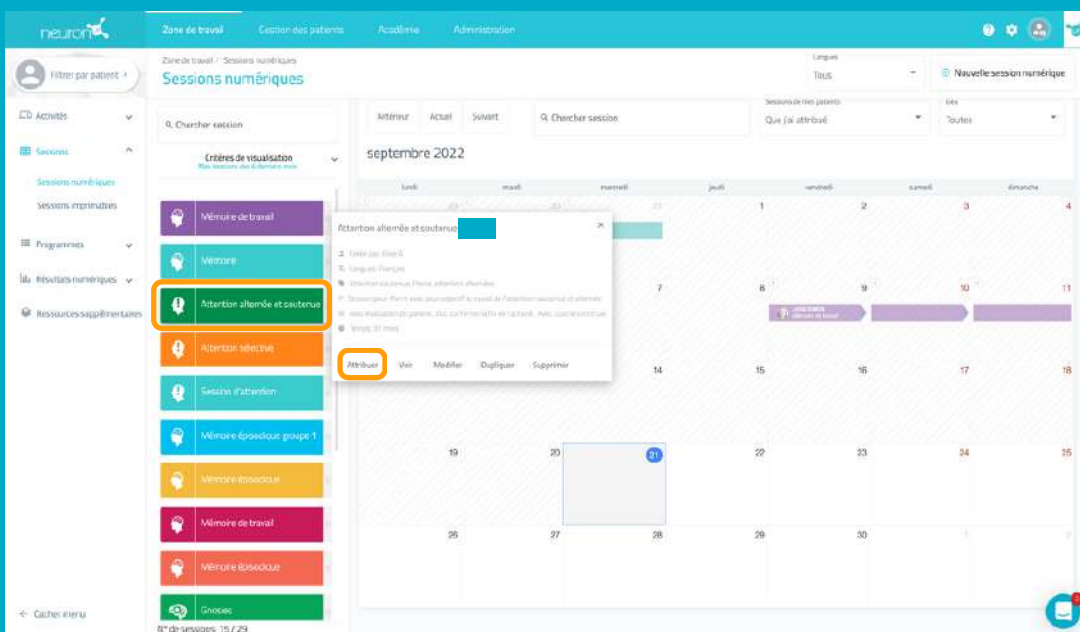

Cliquez ou faites glisser la session sur la date de début souhaitée.

### 3. Choisissez à quels patients attribuer la session

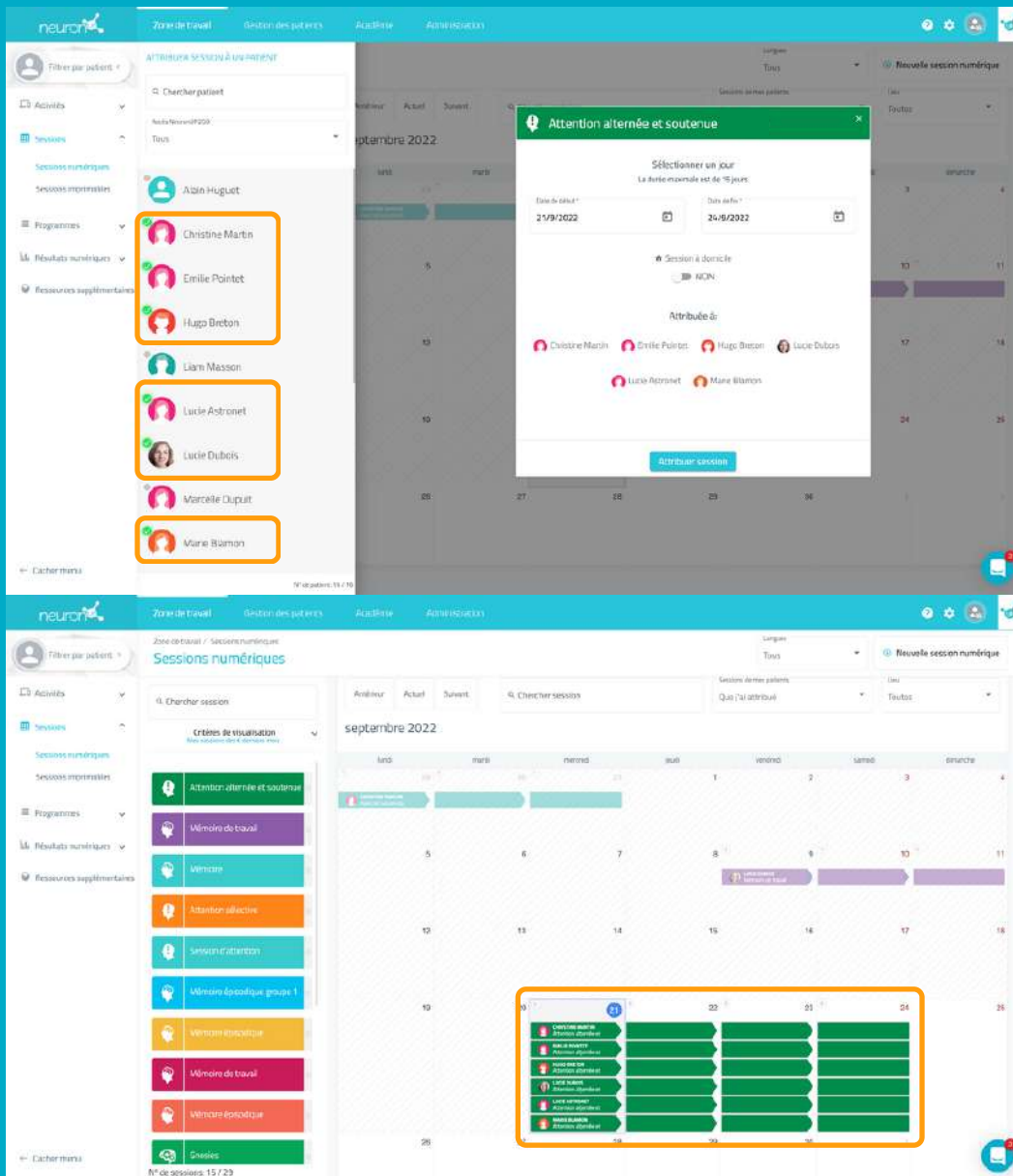


Dans la liste des patients, choisissez ceux qui vont travailler avec cette session.

Attention : pour que les patients puissent travailler individuellement en même temps, il est nécessaire que vous ayez autant de dispositif que de patients.

Par exemple : pour 6 patients qui travaillent en même temps, vous devez avoir 6 ordinateurs ou 3 ordinateurs et 3 tablettes par exemple.


### 4. Allez sur le dispositif du 1° patient, connectez-vous et démarrez la session

À partir d'ici vous devrez répéter le processus sur le dispositif de chaque patient.

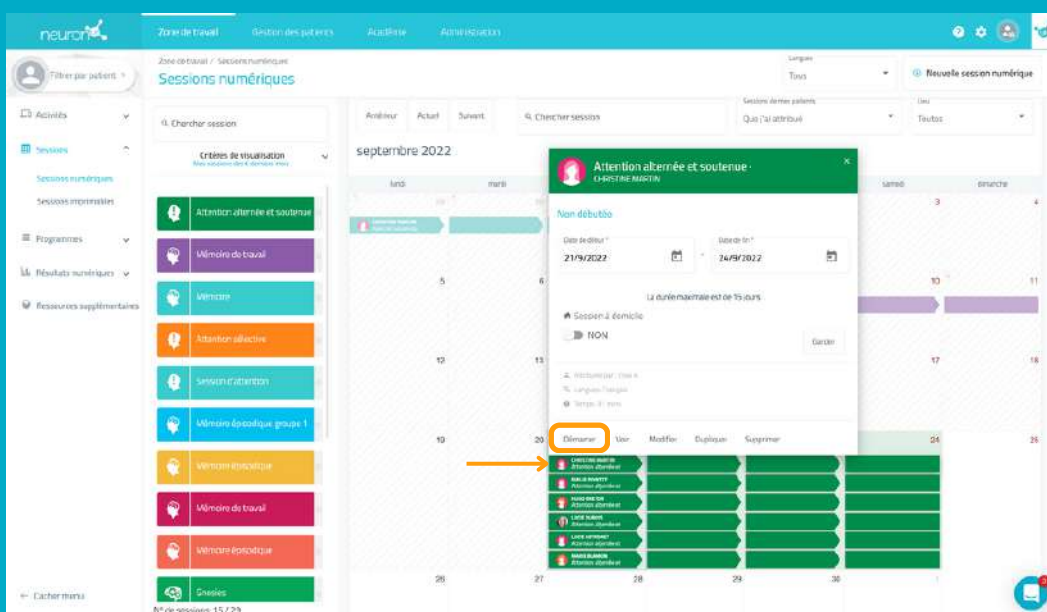


Une fois connecté sur l'ordinateur du premier patient, allez dans les sessions, sélectionnez celle du patient (ici Christine Martin) et cliquez sur démarrer.

## La session du patient démarre sur son dispositif


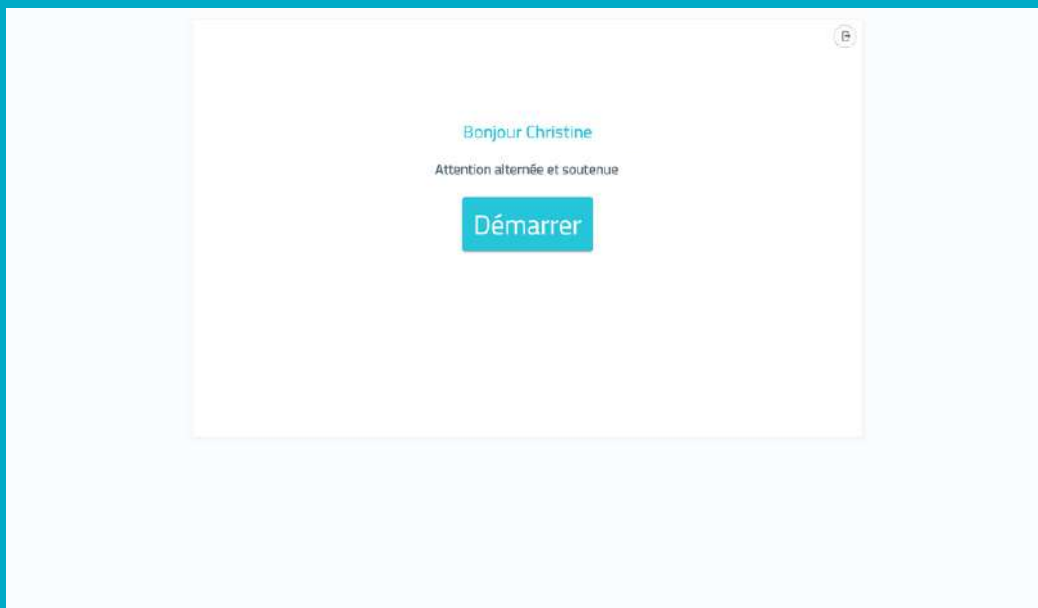


À partir d'ici, votre session est sécurisée, votre patient ne peut accéder qu'à sa session.

Il n'a qu'à cliquer sur démarrer pour commencer à travailler.

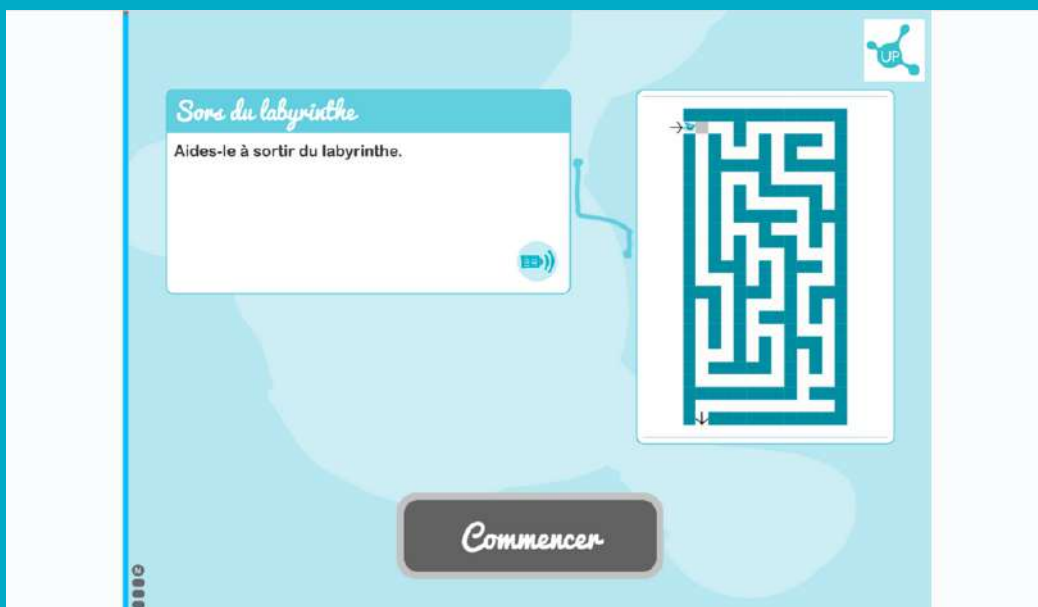


## Allez maintenant sur le dispositif du patient suivant

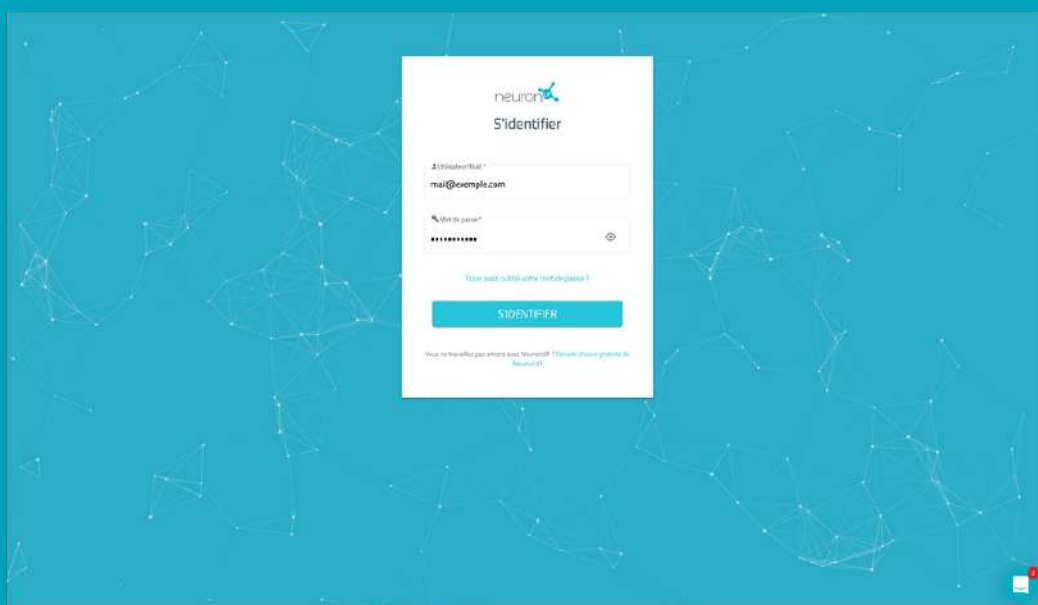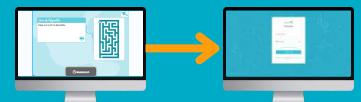


Répétez le processus précédent.


Connectez-vous avec vos identifiants sur le dispositif du 2<sup>e</sup> patient.

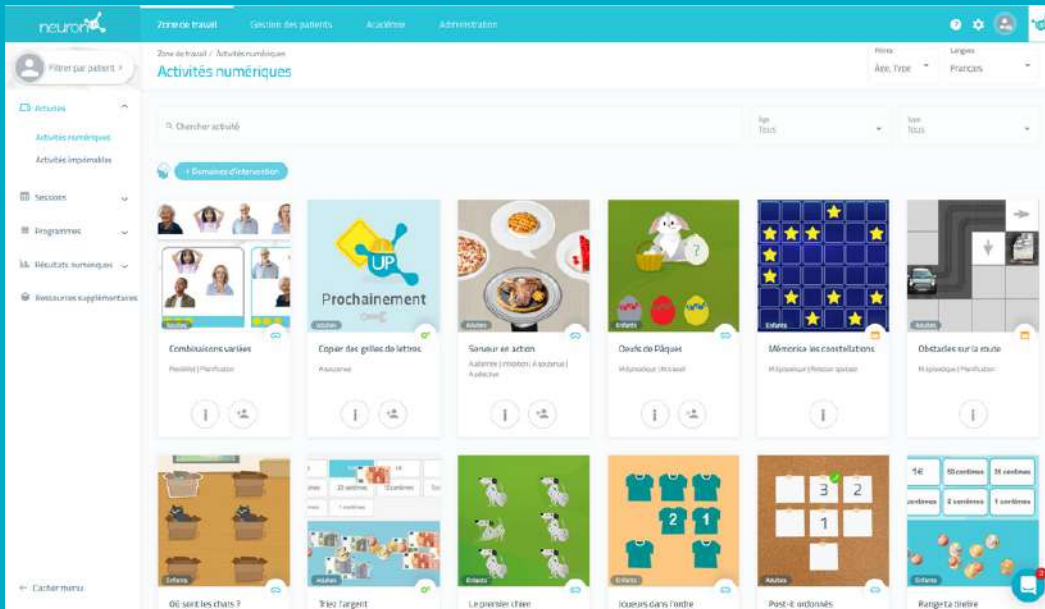

Allez dans les sessions numériques.

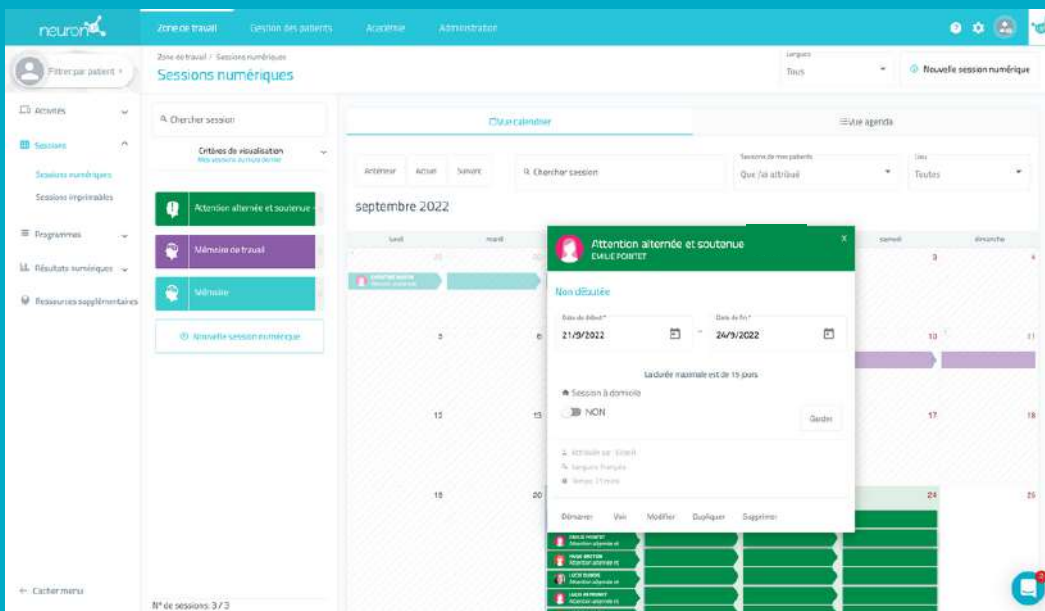

Sélectionnez la session du patient, ici "Émilie Pointet" et cliquer sur démarrer.

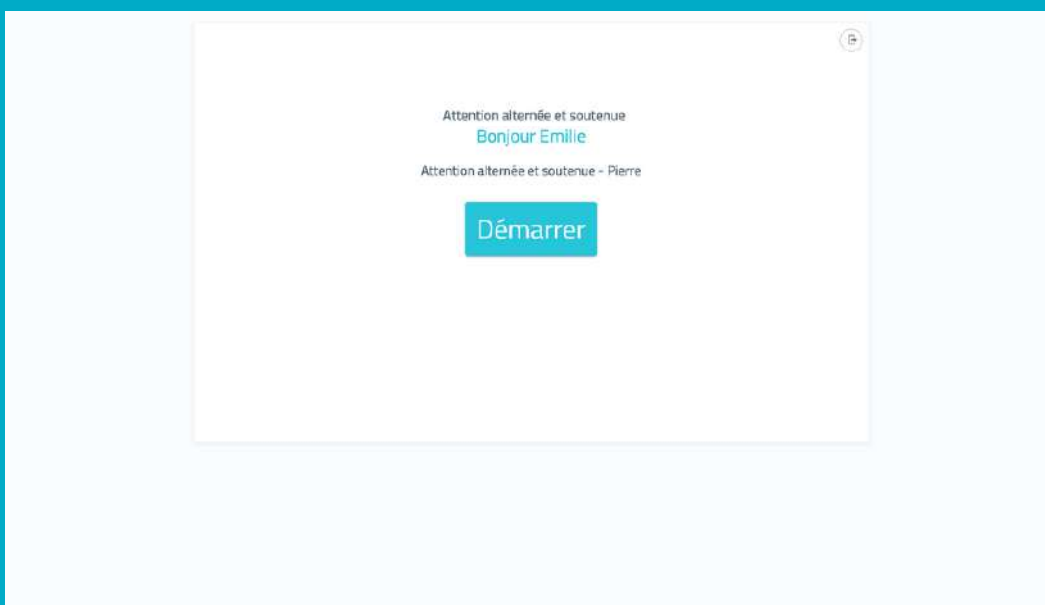

La session démarre.

Répétez le processus pour les 6 patients concernés (dans l'exemple).