

# GUIDE


## TRAVAILLER EN GROUPE






Avec NeuronUP, vous pouvez faire travailler vos patients ensemble. Pour cela, utilisez un seul dispositif (ordinateur, tablette ou rétroprojecteur en fonction du nombre de patients).

## 1. Créer un profil patient pour le groupe de travail

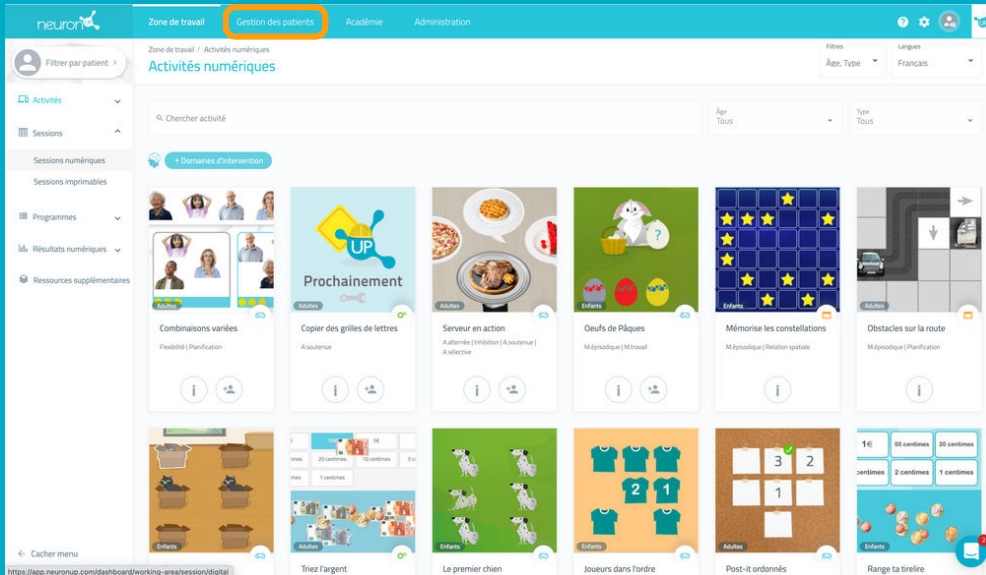

Il est important de créer un profil spécifique pour travailler en groupe, afin de ne pas fausser les résultats d'un patient lors de l'enregistrement de ces derniers.

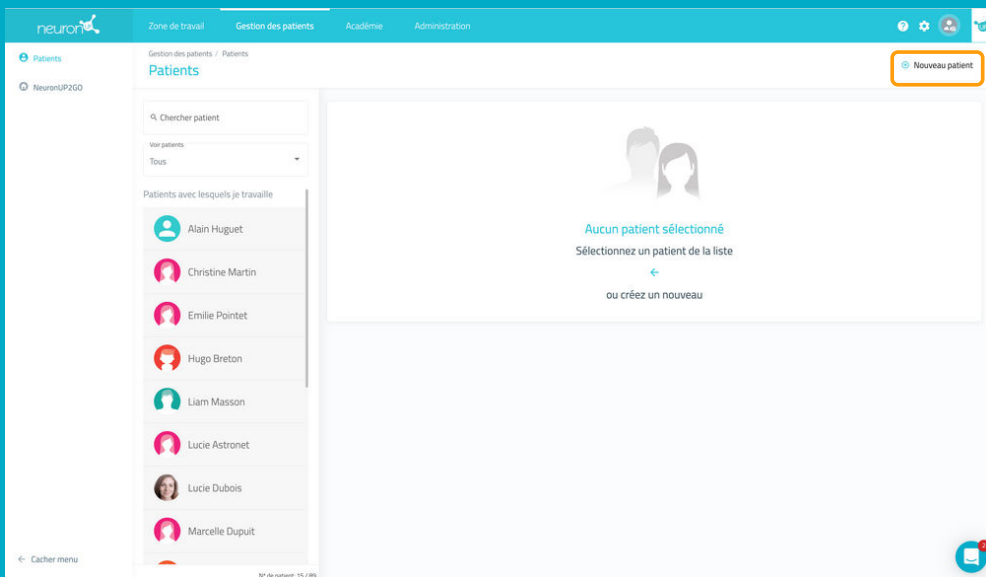


Cliquez sur "Nouveau patient" en haut à droite.


## 2. Remplir les informations du profil

Vous pouvez mettre le nom qui vous semble le plus approprié pour le profil de votre groupe de travail.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons mis "groupe" pour le prénom et "3" pour le nom.

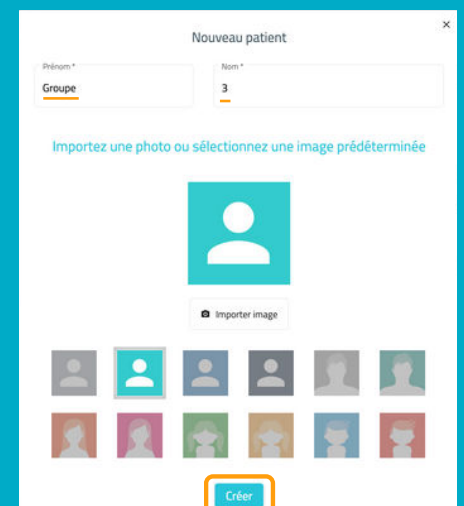


# Attribuer une session au groupe de travail

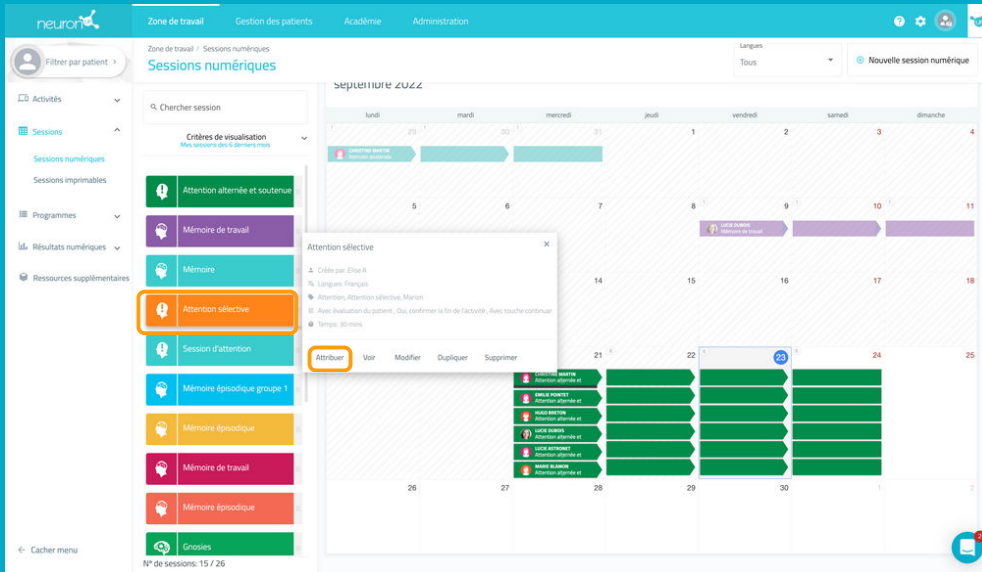


Allez dans sessions numériques.

Choisissez une session, cliquez dessus ou faites-la glisser pour l'attribuer.

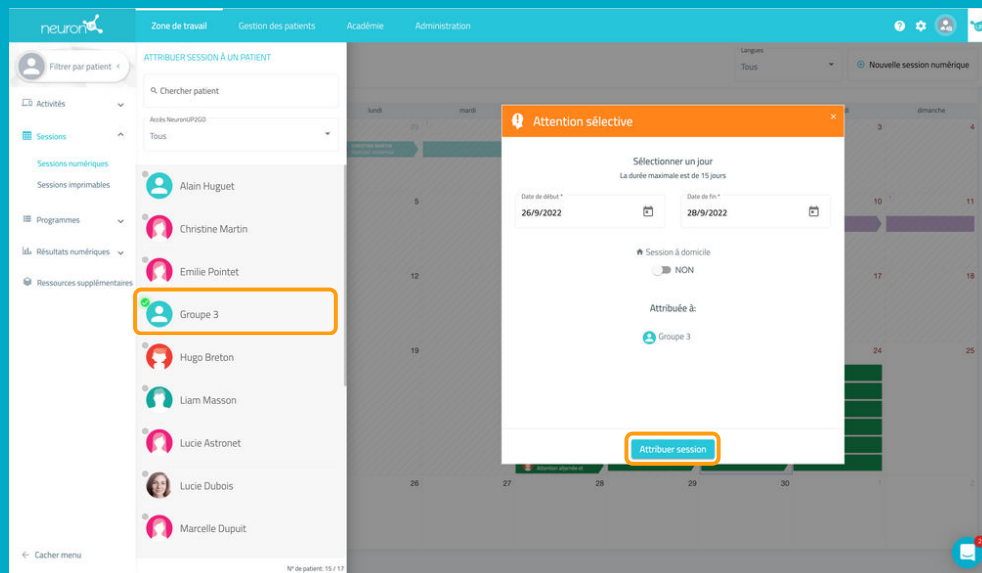

Choisissez le profil appelé "Groupe 3"

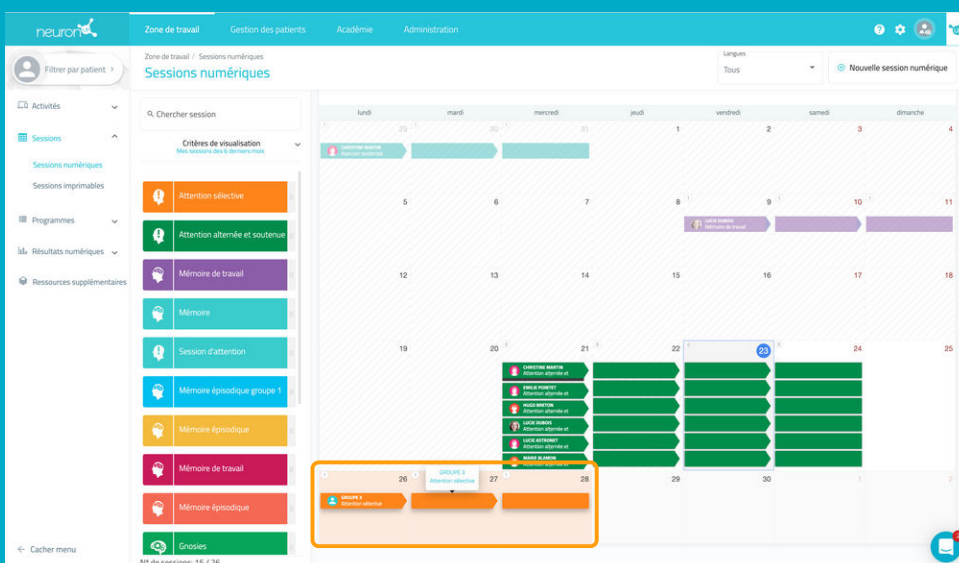

Une fois que votre dispositif de travail et vos patients sont prêts à travailler ensemble, cliquez sur la session puis sur "démarrer".